

Pflege am Patienten



Fruchtblasensprenger Amnicot (100 Stück)

ArtNr: 59000002

Beschreibung:

Der Amnicot-Fruchtblasensprenger besteht aus einem Gummifingerling mit einem fest aufgesetzten kleinen Kunststoffhaken/Schneide. Dieser Fingerling wird auf den Mittel- oder Zeigefinger einer steril behandschuhten Hand aufgesetzt.

- Es ist wichtig darauf zu achten, daß der Haken sich oben auf dem Finger befindet. Jetzt wird die Fruchtblasensprengung für den behandelnden Arzt/ Ärztin bzw. die Hebamme und für die Patientin wesentlich leichter.
- Einfach zu verwenden
- Weniger Schmerz, weniger Angst
- Exakte Plazierung des Schneidhakens
- Keine Assistenz nötig
- Keine Lithotomy nötig
- Geringe Kosten