

Labor - Lanzetten

Sicherheitslanzetten Ultrasafe 21 G, 0,80 mm x 2,8 mm, pink (100 Stück)



ArtNr: 19170016
PZN: 19264836
Umkarton: 10 Packungen

Beschreibung:

- Funktion kann nur einmal ausgelöst werden
- Lanzette verschwindet wieder in der Schutzvorrichtung

Anwendung:

1. Schutzkappe vorsichtig abdrehen
2. Lanzette ansetzen (Kontaktaktivierung) -> kein "Leerstechen" möglich
3. Lanzette durch Andrücken auslösen -> Klicken
4. Lanzette komplett entsorgen